

Original brugsanvisning



Varenr.: 9027917-18

Ecomatic automatsprøjte 2 el. 5 ml



Sdr. Ringvej 1 - 6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30
www.p-lindberg.dk

Automatsprøjte 2 ml - Varenr. 9027917

Automatsprøjte 5 ml - Varenr. 9027918

Beskrivelse: Automatiske doseringssprøjter. Sprøjterne har metalansats, Luer lock ansats, selvfyldende dosering og er udstyret med V-fjeder, der sikrer et jævnt tryk.


Anvendelsesområder: Til injektion af f.eks. vaccine.

Tilsigtet brug: Udstyret må kun anvendes som beskrevet i denne manual – al anden brug betragtes som forkert.

Indhold

Overblik over udstyret	3
Brugsanvisning	3
Isætning af kanyle:	3
Isætning af tilførselsslange:	4
Dosering:	4
Påfyldning:	4
Rengøring og vedligeholdelse	5
Desinficering:	5
Smøring:	5

Overblik over udstyret

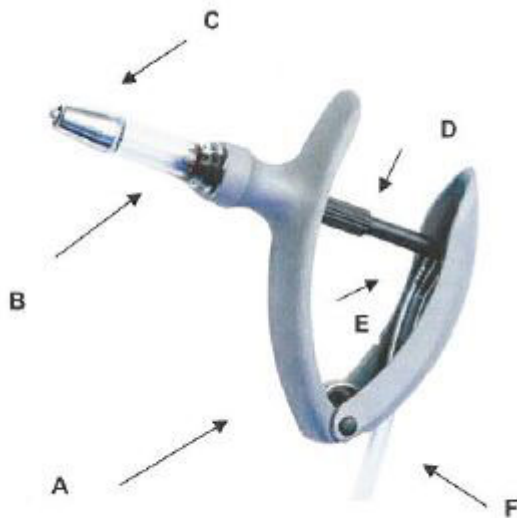

- A. Ergonomisk håndtag
- B. Plastik cylinder med O-ring og stempel
- C. Metal kanyleholder
- D. Doseringsindstilling
- E. Slangeansats
- F. Hul i håndtaget, hvorigennem slangen skal løbe

Brugsanvisning

Udstyret er beregnet til vedvarende anvendelse – kun O-ring og cylinder kan udskiftes ved behov.

Det er vigtigt at sprøjten renses forud for hver anvendelse. Følg venligst producentens anbefalinger når der anvendes rengørings-/desinficeringsmidler.

Isætning af kanyle:

Vigtigt:

- Lad beskyttelsehætten sidde på kanylen indtil denne skal anvendes (gælder kun for engangskanyler).
- Sæt kanylen i Luer Lock ansatsen og drej den med uret for at låse den fast.
- Kanylen tages ud ved at dreje modsat – dvs. mod uret.


Isætning af tilførselsslange:

1. Sæt tilførselsslangen på sprøjtens indgangshul.
2. Skub slangen igennem hullet i håndtaget og ret slangen ud.



Dosering:

Drej doseringsindstillingen enten med eller mod uret indtil stemplets front står ud for doseringen, som er trykt på cylinderen.

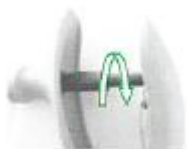

Indstilling af dosering

Påfyldning:

1. Fjern beskyttelseshætten fra nålen.
2. Hold sprøjten med en svag hældning.
3. Tryk håndtaget ind og slip det hurtigt for at trække væske ind i cylinderen.
4. For at fjerne luftbobler fra cylinderen, gentages processen indtil de er forsvundet.

Rengøring og vedligeholdelse

Efter brug af udstyret, skal det rengøres med sæbevand og skylles grundigt med rent, varmt vand.

Vigtigt! Hvis sprøjten, efter rengøring som beskrevet ovenfor, trækker luft ind, er det muligvis fordi en ventil i den forreste metaltilgang har sat sig fast. Ventilen løsnes ved at man, ganske let, banker sprøjtes forreste del mod en genstand, som f.eks. en bordkant og derefter skyller sprøjten igennem med varmt vand.

Desinficering:

Det anbefales altid at desinficere både sprøjte og kanyler før hver brug.

1. Rengør sprøjten med varmt vand – brug en flaske med varmt vand.
2. Læg sprøjte inkl. kanyler i en beholder med vand og kog i ca. 20 minutter. Det anbefales at afmontere cylinderen fra håndtaget og koge sprøjten i adskilt tilstand.
3. Efter kogningen tages udstyret op at beholderen, aftørres med en tør klud og tømmes for væske.

Smøring:

Fjern cylinderen ved at dreje den. Smør stempel og glascylinder med 100% ren koldpresset oliven- eller anden tilsvarende vegetabilsk olie. Følg leverandørens instruktioner vedr. holdbarhed og opbevaring.

Brug ikke mineralsk olie, silikoneolier, WD-40, glycerin eller alkohol. Petroleumbaserede produkter vil få stemplet og O-ring til at hærde og dermed ødelægge delene eller forkorte deres levetid.

Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.